

Lâminas Apex

Corte e dissecação ultra-precisos

Apex Arachnoid Knives™ disponíveis em quatro modelos de lâminas de aço inoxidável incrivelmente afiadas e delicadas, com seis alças leves em Ultem® rígido e pré-montadas em uma embalagem estéril de uso único.

**VERSATILIDADE
PRECISÃO
LEVEZA**

**DESENVOLVIDA
POR
CIRURGIÕES
PARA
CIRURGIÕES**

Características incluem

- Lâminas ultrafinas de chanfro duplo para corte preciso, estável e uniforme
- Alças rígidas leves, para feedback tátil ideal com um módulo de alta flexibilidade
- Revestimento hidrofílico para arraste mínimo de tecido
- Acabamento não ofuscante para melhor visibilidade
- Lâminas pré-montadas para conveniência e velocidade



PRO-BS


Searching and Delivering
Innovation



Circular

Lâmina circular de diâmetro 2.2 mm com ponta de 0.9 mm de espessura e ângulo de corte de 320°


Planos de desenvolvimento: facilita o fluxo de uma operação, permitindo a transição da dissecação de corte e romba. A mais robusta das quatro Lâminas.

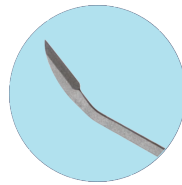

Corte Traseiro

Lâmina com ponta de 2.6 mm de espessura com lâmina de 65° de ângulo


Dissecação segura sobre áreas críticas: dissecar com confiança sobre as estruturas mais críticas e delicadas. O fundo da lâmina é cego.

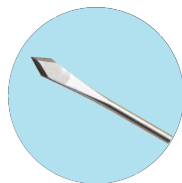

Penetradora

Lâmina em lanceta de 1.0 mm com ponta de 0.8 mm de espessura

Precisão exata: permite dissecação minuciosa em áreas onde nenhuma tensão é permitida.

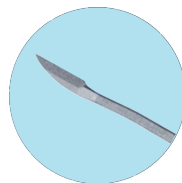

Corte Lateral

Lâmina de 3.0 mm de comprimento e ponta de 0.9 mm de espessura

Dissecação segura e precisa: perfil fino com borda segura permite segurança e precisão em áreas apertadas. A lâmina de corte lateral tem a mesma borda segura que a de corte posterior, mas não é angulada.

CABOS

- Longo de 8"
- Superficial de 5"
- Cabo curto de baioneta de 1" e 2"
- Cabo de baioneta
- Cabo de baioneta estendido

Como são comercializadas?

- As Lâminas Apex Arachnoid Knives™ são vendidas individualmente, pré-montadas em embalagem estéril.
- A Apex Medical recomenda que as lâminas sejam usadas apenas uma vez. A ponta fina da navalha é exatamente o que torna essas lâminas únicas. É impossível manter a precisão de uma borda fina e delicada com uso prolongado.

Quem usa?

"A lâmina Apex é a melhor ferramenta para abrir a aracnóide da fissura Sylvian e separar microscopicamente os nervos cranianos da superfície do tumor."

- Harry R. Van Loveren, M.D., University of South Florida

"As lâminas Apex são ferramentas versáteis para dissecação precisa de planos aracnóides em cirurgia aberta e endoscópica da base do crânio."

- James K. Liu, M.D., Rutgers, Neurological Institute of New Jersey

"Não farei um bypass sem as Lâminas Apex."

- David Langer, M.D., Albert Einstein College of Medicine

"Uso a lâmina Apex para dissecar os nervos e vasos cranianos da cápsula do tumor. Também me permite identificar nitidamente a zona de entrada da raiz do nervo dorsal em casos de medula espinhal amarrada."

- Peter P. Sun, M.D., Children's Hospital of Oakland

"Quando se trata de fazer a arteriotomia para iniciar um desvio, não há nada melhor do que as lâminas Apex, especialmente ao fazer um desvio profundo."

- Michael T. Lawton, M.D., University of California, San Francisco

Alameda Terracota, 185 cj. 1216
São Caetano do Sul – SP
+55 11 4118-2846
sac@pro-bs.med.br
cotacao@pro-bs.med.br

www.pro-bs.med.br



PRO-BS

Searching and Delivering
Innovation