

## PRECISÃO PARA MICRODISSECÇÃO



**Traumec**  
HEALTH TECHNOLOGY



# AGULHAS PARA MICRODISSECÇÃO

Os dissectores Traumecc são produtos de precisão para microdissecção, podendo ser utilizados em todas as especialidades medicas e odontológicas cirúrgicas principalmente em cirurgias plásticas, cabeça e pescoço, buco maxilo, ortopedia, otorrinolaringologia etc.

Este produto provoca pouco sangramento em regiões bastante vascularizadas. Sua ponta é ultrafina e libera uma onda de calor provocada pelo gerador de eletro cirurgia para uma incisão com corte preciso e específico.

O dissector também possui um polímero de isolamento resistente a temperatura, prevenindo queimaduras acidentais e permitindo um acesso mais profundo sem lesionar o tecido indesejado, auxiliando o cirurgião que necessitava de menos pressão, ou seja, o peso da mão será o suficiente para a precisão do corte.

Além de diminuir o sangramento durante a cirurgia, no seu termino, o paciente apresentara menos inchaço, pois o trauma é menor. As cicatrizações são favorecidas.

## Agulhas para Microdissecção

Para maioria dos procedimentos cirúrgicos se recomenda o uso do dissector PA.02.03.0007. Este dissector multiuso é usado em procedimentos:

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| ó Abdominoplastia        | ó Plastica Pediátrica/Neuro      |
| ó Blefaroplastia         | ó Incisões Intra orais           |
| ó Abertura Bicoloronal   | ó Cirurgia de pé                 |
| ó Redução de Mama        | ó Prótese/Endoproteze de Quadril |
| ó Cantoplastia           | ó Prótese/Endoproteze de Joelho  |
| ó Lesões Faciais         | ó Frenectomia Labial             |
| ó Facelift               | ó Gengivectomia                  |
| ó Facelift               | ó Enxerto Palatal                |
| ó Corrugador             | ó Incisão Pré-auricular para ATM |
| ó Otoplastia             | ó Redução Sub Mandibular         |
| ó Platismotomia Fechada  | ó Incisões na pele para enxerto  |
| ó Rinoplastia            | ó Laminectomia                   |
| ó Remoção de Cicatrizes  | ó Rizotomia                      |
| ó Fissura Labial         | ó Dissecção do Pescoço           |
| ó Fenda Palatina         | ó Palatoplastia                  |
| ó Incisões Coronais      | ó Incisão Tímpano Meatal         |
| ó Incisões Trauma Facial |                                  |
| ó Cirurgia de Mão        |                                  |

PA 02.03.0007  
Dissector reto 52x3mm E

PA 02.03.0008  
Dissector reto 62x3mm E


Outros cirurgiões preferem os dissectores Traumecc com 6 cm de comprimento ao invés de 5 cm (PA.02.03.0007). Somados os procedimentos acima, este dissector pode ser utilizado também para Amigdalectomia.

PA 02.03.0010  
Dissector reto 110x3mm E


Os dissectores longos estão disponíveis em 110mm, 135mm, 160mm and 186mm de comprimento (PA.02.03.0010, PA.02.03.0011, PA.02.03.0012 e PA.02.03.0013) e são populares nos procedimentos para colocação de implantes mamários.

PA 02.03.0025  
Dissector 45° 60x3mm E


Para cirurgiões que preferem uma ponta em ângulo, a Traumecc oferece o modelo PA.02.03.0025, alcançando melhores resultados para procedimentos como Blefaroplastia e Cantoplastia.

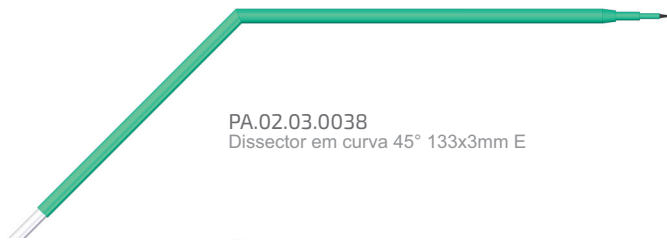


PA.02.03.0038  
Dissector em curva 45° 133x3mm E

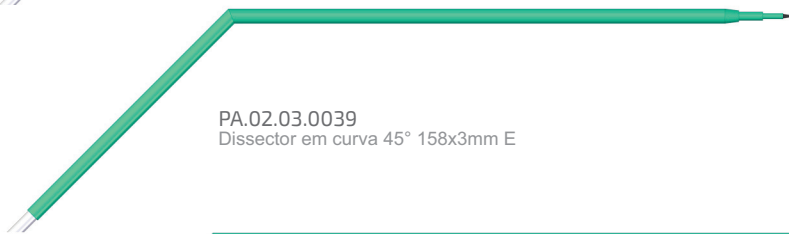

PA.02.03.0039  
Dissector em curva 45° 158x3mm E

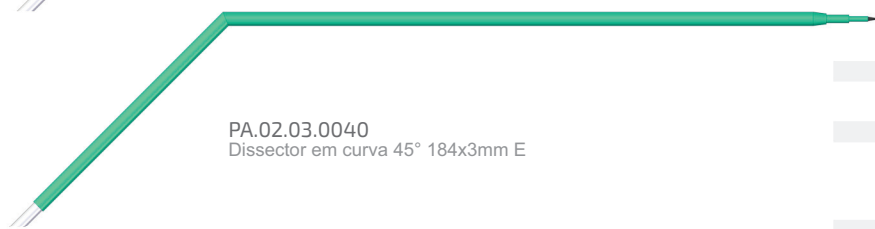


PA.02.03.0040  
Dissector em curva 45° 184x3mm E

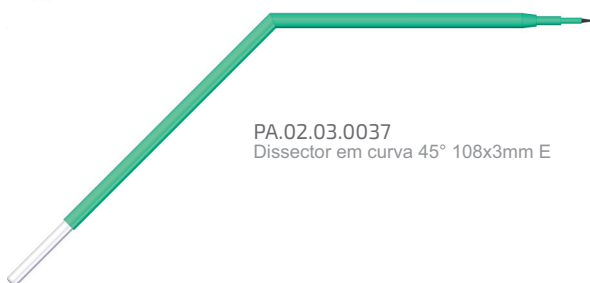


PA.02.03.0037  
Dissector em curva 45° 108x3mm E



PA.02.03.0041  
Dissector em contorno 155x3mm E

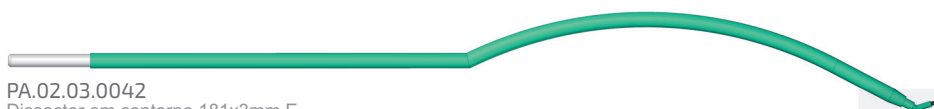

PA.02.03.0042  
Dissector em contorno 181x3mm E

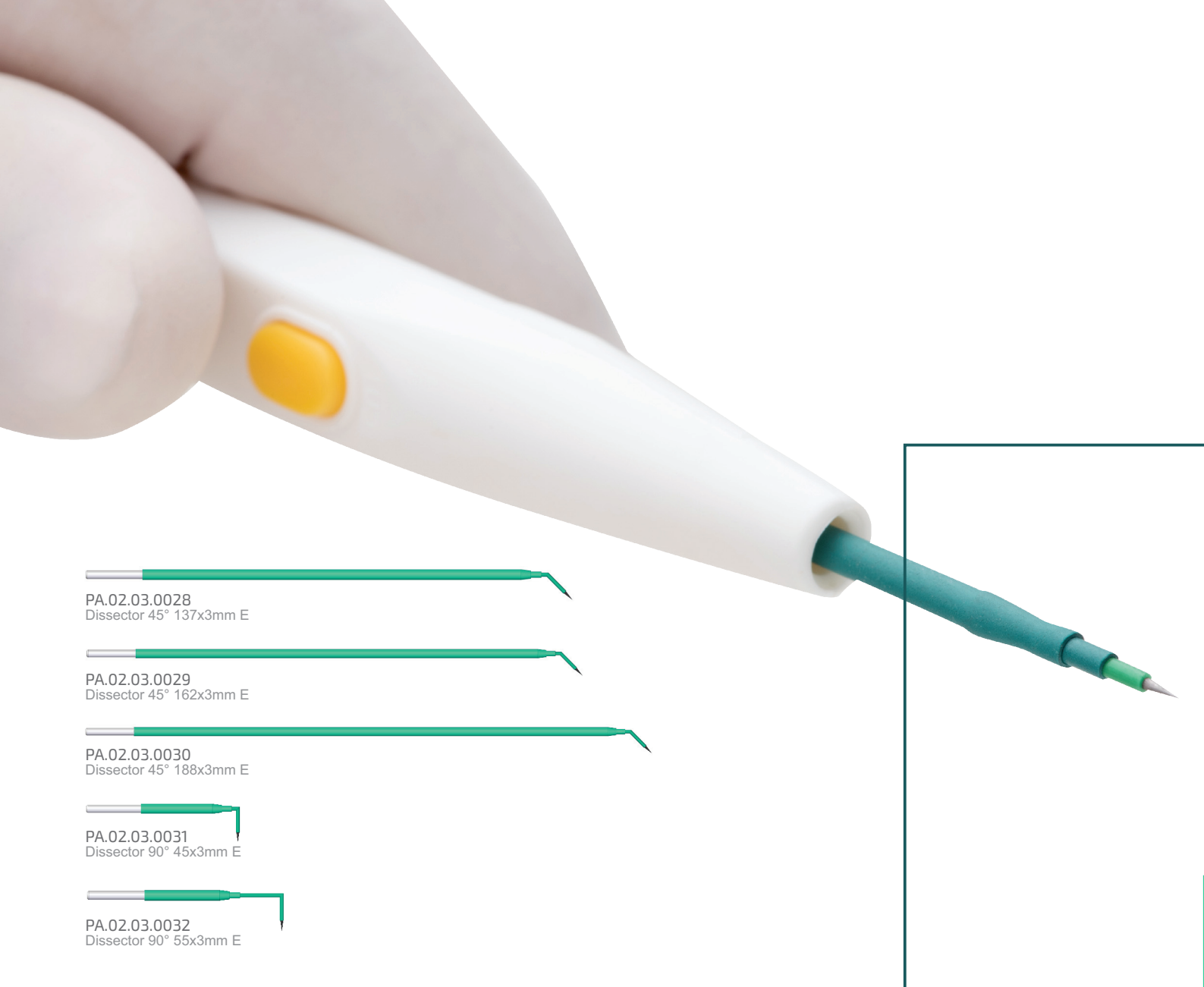

PA.02.03.0028  
Dissector 45° 137x3mm E

PA.02.03.0029  
Dissector 45° 162x3mm E

PA.02.03.0030  
Dissector 45° 188x3mm E

PA.02.03.0031  
Dissector 90° 45x3mm E

PA.02.03.0032  
Dissector 90° 55x3mm E

PA.02.03.0033  
Dissector curvo 106x3mm E

PA.02.03.0034  
Dissector curvo 131x3mm E

PA.02.03.0035  
Dissector curvo 156x3mm E

PA.02.03.0036  
Dissector curvo 182x3mm E

PA 02.03.0037  
Dissector em curva 45° 108x3mm E

Os dissectores alongados e angulados estão disponíveis em 108mm, 133mm, 158mm and 184mm de comprimento (PA.02.03.0037, PA.02.03.0038, PA.02.03.0039 e PA.02.03.0040). São utilizados em procedimento de otorrino.

PA 02.03.0048  
Dissector Reto 135x33mm N

Dissector alongado e fino é usado regularmente em procedimentos de artroscopia da ATM.

PA 02.03.0057  
Dissector Reto 108,5x45°x3mm N

Dissector alongado e fino com ponta levemente angulada é usado regularmente em procedimentos de artroscopia da ATM.

## Agulhas mais utilizadas para microdissecção

Procedimentos Estéticos	*Potência Recomendada	Agulha Dissectora Traumec Recomendada (código)
Abdominoplastia	10-18	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0009, PA.02.03.0011
Incisão Bicoloral	4-13	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008
Blefaroplastia	6-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018, PA.02.03.0025
Aumento de Mama	10-25	PA.02.03.0008
Redução de Mama	10-25	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008
Cantoplastia	6-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018, PA.02.03.0025
Facelift	6-10	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018
Lesões faciais	4-10	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018
Corrugador	6-9	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0009, PA.02.03.0011, PA.02.03.0024, PA.02.03.0026, PA.02.03.0042
Frontoplastia	6-12	PA.02.03.0042
Otoplastia	6-10	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018
Platismotomia Fechada	4-6	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008
Rinoplastia	6-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018
Remoção de cicatrizes	-	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0025, PA.02.03.0026, PA.02.03.0042

## PROCEDIMENTOS DE RECONSTRUÇÃO

Procedimento de Reconstrução	*Potência Recomendada	Agulha Dissectora Traumec Recomendada (código)
Fisura Labial	5-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018
Fisura de Paladar	4-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0018, PA.02.03.0025
Incisão Coronal	5-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008
Incisão Trauma Facial	6-12	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008
Cirurgia de Pé	6-12	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018
Cirurgia de Mão	6-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018
Incisões Intra-orais	4-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018, PA.02.03.0025
Otoplastia	6-10	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018
Plástica Pediátrica	4-6	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018
Base do Crânio	6-10	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018, PA.02.03.0009, PA.02.03.0011

## PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS

Procedimentos Ortopédicos	*Potência recomendada	Agulha Dissectora Traumecc Recomendada (código)
Prótese de Quadril	10-25	PA.02.03.0006, PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0017, PA.02.03.0018, PA.02.03.0009, PA.02.03.0011, PA.02.03.0012, PA.02.03.0019, PA.02.03.0020,
Prótese de Joelho	10-25	PA.02.03.0006, PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0017, PA.02.03.0018, PA.02.03.0009, PA.02.03.0011, PA.02.03.0012, PA.02.03.0019, PA.02.03.0020, PA.02.03.0021

## PROCEDIMENTOS ORAL E MAXILOFACIAL

Procedimento Oral e Maxilofacial	*Potência recomendada	Agulha Dissectora Traumecc Recomendada (código)
Frenectomia Labial	5-7	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018
Gengivectomia	4-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018, PA.02.03.0025
Enxerto Palatal	4-6	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018, PA.02.03.0025
Incisão Pré-auricular para ATM	5-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008
Incisão na pele para enxerto	6-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008
Cauterização Intra articular de ATM	5-8	PA.02.03.0048, PA.02.03.0057

## PROCEDIMENTOS NEUROCIRÚRGICOS


Procedimentos Neurocirúrgicos	*Potência recomendada	Agulha Dissectora Traumecc recomendada (código)
Laminectomia	5-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008
Rizotomia	5-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008

## PROCEDIMENTOS OUVIDO, NARIZ, GARGANTA

Procedimentos Ouvido, nariz, garganta	*Potência recomendada	Agulha Dissectora Traumecc recomendada (código)
Adenoidectomia	6-8	PA.02.03.0037, PA.02.03.0038, PA.02.03.0039, PA.02.03.0040
Etmoidectomia	6-8	PA.02.03.0037, PA.02.03.0038, PA.02.03.0039, PA.02.03.0040
Dissecção do Pescoço	6-10	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0009, PA.02.03.0011, PA.02.03.0012
Otoplastia	6-10	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008
Palatoplastia	6-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008, PA.02.03.0018
Rinoplastia	6-8	PA.02.03.0007, PA.02.03.0008
Septoplastia	6-8	PA.02.03.0037, PA.02.03.0038, PA.02.03.0039, PA.02.03.0040
Amigdalectomia	6-15	PA.02.03.0008, PA.02.03.0009, PA.02.03.0011, PA.02.03.0019, PA.02.03.0020, PA.02.03.0024, PA.02.03.0026
Turbinectomia	6-8	PA.02.03.0037, PA.02.03.0038, PA.02.03.0039, PA.02.03.0040
Incisão Tímpano Meatal	5-8	PA.02.03.0007




PA 02.03.0006  
Dissector reto 45x3mm E



PA 02.03.0009  
Dissector reto 84x3mm E




PA 02.03.0011  
Dissector reto 135x3mm E




PA 02.03.0012  
Dissector reto 160x3mm E



PA 02.03.0013  
Dissector reto 186x3mm E



PA 02.03.0014  
Dissector reto 52x3mm E sem isolante




PA 02.03.0015  
Dissector reto 62x3mm E sem isolante




PA 02.03.0016  
Dissector reto 46,5x45°x3mm E



PA 02.03.0017  
Dissector reto 53,5x45°x3mm E




PA 02.03.0018  
Dissector reto 63,5x45°x3mm E




PA 02.03.0019  
Dissector reto 82,5x45°x3mm E



PA 02.03.0020  
Dissector reto 108,5x45°x3mm E




PA 02.03.0021  
Dissector reto 133,5x45°x3mm E




PA 02.03.0022  
Dissector reto 158,5x45°x3mm E




PA 02.03.0023  
Dissector reto 184,5x45°x3mm E



PA 02.03.0024  
Dissector 45° 50x3mm E



PA 02.03.0026  
Dissector 45° 86x3mm E



PA 02.03.0027  
Dissector 45° 112x3mm E



LISTA DE AGULHAS



Rua 1A JC, 138, Jd. Centenário, 13503-510, Rio Claro/SP | Brasil  
traumec.com.br  
export@traumec.com.br | vendas@traumec.com.br  
+55 (19) 3522.1177